

## Gebrauchsanweisung Schleimhautstanze ø 4,0 mm (REF 3088) und Schleimhautstanze ø 5,0 mm (REF 3089)

Die Schleimhautstanze in das Winkelstück einsetzen. Mit einer Geschwindigkeit von max. 250 U/min durch das Weichgewebe bis zum Alveolarkamm schneiden. Eventuell mit einem Skalpell oder Raspatorium den Gewebestopfen vom Alveolarkamm lösen.

Material: Chronifer Stahl

## Instructions for Use Mucosal Punch ø 4.0 mm (REF 3088) and Mucosal Punch ø 5.0 mm (REF 3089)

Insert the Mucosal Punch in the handpiece. Cut through the soft tissue up to the alveolar ridge at a maximum speed of 250 rpm. Eventually, detach the tissue plug from the alveolar ridge by using a scalpel or a raspatory.

Material: Chronifer Steel

## Instructions d'utilisation Stance de muqueuse ø 4,0 mm (REF 3088) et Stance de muqueuse ø 5,0 mm (REF 3089)

Insérer la stance de muqueuse dans le contre-angle. Ouvrir le tissu mou jusqu'à la crête alvéolaire avec une vitesse maximale de 250 rpm. Éventuellement, détacher l'obturateur de tissu de la crête alvéolaire avec un scalpel ou une rugine.

Matériel: Acier Chronifer



Hersteller in der EU/Manufacturer in the EU/Fabricant dans l'UE:

Champions-Implants GmbH

Geschäftsführer/Managing Director/Direction: Dr. med. dent. Armin Nedjat

Champions Platz 1

D-55237 Flonheim

Deutschland/Germany/Allemagne

Tel. (49) (0) 6734 - 914 080 | Fax (49) (0) 6734 - 105 3

info@champions-implants.com

www.champions-implants.com

Champions® ist ein eingetragenes Warenzeichen der/

Champions® is a registered trademark of/

Champions® est une marque déposée de

Champions-Implants GmbH

ANL Nr. 3 A | Rev. Stand 2014-03

### Zeichenerklärung | Symbols | Symboles:



Maximal zulässige Drehzahl: 250 min<sup>-1</sup>

Maximum permissible rotation speed:  
250 min<sup>-1</sup>

Vitesse de rotation maximale permise:  
250 min<sup>-1</sup>